

Instrukcja obsługi

Aktywny wózek inwalidzki S2 (41/46)



Wersja instrukcji 1.0 z 03 2023

Przed rozpoczęciem korzystania z wózka inwalidzkiego należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niewłaściwe użycie wózka inwalidzkiego może spowodować uszkodzenie ciała lub obrażenia ciała. Jeśli nie rozumiesz instrukcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą w celu uzyskania pełnego wyjaśnienia instrukcji, ostrzeżeń i ostrzeżeń. W przeciwnym razie, może dojść do obrażeń lub uszkodzeń.

1.0 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA PRZED JAZDĄ

Zalecamy przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa przed każdym użyciem, aby upewnić się, że wózek jest sprawny, działa płynnie i bezpiecznie.

Przed użyciem wózka wykonaj następujące kontrole:

1. Sprawdź stan opon. Upewnij się, że nie są uszkodzone lub nadmiernie zużyte.
2. Sprawdź wszystkie hamulce. Upewnij się, że są sprawne.
3. Sprawdź siedzenie. Upewnij się, że nie jest nadmiernie zużyte.

Jeśli odkryjesz problem, skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.

2.0 SPECYFIKACJA

Maksymalna waga użytkownika	125kg
Waga kompletnego wózka	9,5kg
Długość całkowita	93cm
Wysokość całkowita	84-96cm
Szerokość całkowita	60/65cm
Szerokość siedziska	41/46cm
Głębokość siedziska	39cm
Wysokość siedziska	38-51cm
Wysokość oparcia	34cm z poduszką 38cm bez poduszki
Kąt oparcia	88°-108°
Wysokość podłokietników	18-23cm
Koła przednie	4"/10cm PU Pełne
Koła tylne	24"/60cm Pneumatyczne
Regulacja wysokości podłokietników	Tak
Poduszka	4cm piankowa
Wysokość podnóżków	Regulowana

3.0 ELEMENTY SKŁADOWE WÓZKA



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Oparcie | 8. Koło przednie |
| 2. Panel boczny | 9. Koło tylne z ciągiem napędowym |
| 3. Siedzisko i poduszka siedziska | 10. Adapter koła tylnego |
| 4. Hamulec postojowy | 11. System regulacji podłokietników |
| 5. Przycisk osi szybko złącznej | 12. Rama |
| 6. Podnóżek | 13. Rama oparcia |
| 7. Widelec koła przedniego | 14. Rękojeści do prowadzenia |

4.0 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

 **OSTRZEŻENIE!** Niezastosowanie się do instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie wózka inwalidzkiego lub obrażenia ciała użytkownika;

 **OSTRZEŻENIE!** Unikaj używania wózka inwalidzkiego na jezdniach;

 **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj wózka na piasku, nierównym terenie lub mokrych i śliskich powierzchniach;

 **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj wózka inwalidzkiego, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo;

 **OSTRZEŻENIE!** Wózek inwalidzki nie nadaje się do użytku jako siedzenie w pojeździe silnikowym. Wózek inwalidzki może ulec uszkodzeniu w wyniku zderzenia z pojazdem, prowadząc do obrażeń osoby na wózku inwalidzkim lub innych pasażerów.

 **OSTRZEŻENIE!** Zanim pochyłisz się lub sięgniesz do przodu, zawsze pchnij pośladki do tyłu wózka i skieruj kółka do przodu;

 **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj hamulca ręcznego, aby spowolnić zjazd ze wzniesienia. Nagle zmiana kierunku podczas jazdy w dół pochyłości może spowodować niestabilność lub możliwe przewrócenie wózka;

 **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie podłączaj niczego do kół. Może to spowodować uszkodzenie wózka inwalidzkiego i wpływa na równowagę wózka inwalidzkiego oraz może zranić użytkownika.

 **OSTRZEŻENIE!** Zawsze włączaj hamulce, gdy jesteś w windzie lub na niej i kiedy chcesz zejść.

 **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia i nigdy nie używaj wózka do transportu więcej niż jedna osoba.

 **OSTRZEŻENIE!** Aby zapewnić odpowiednią ochronę przed potencjalnymi przeszkodami, podnóżki powinny mieć minimalny prześwit 7 cm od podłoża;

 **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie stawaj na podnóżkach. Spowoduje to przewrócenie się wózka inwalidzkiego i może zranić użytkownika (ryc. 4.0.1)





OSTRZEŻENIE! Zawsze ustawiaj wózek na stabilnej, płaskiej powierzchni i włączaj hamulce przed przesiadaniem się na wózek lub z wózka inwalidzkiego;



OSTRZEŻENIE! Nieautoryzowana modyfikacja i/lub użycie części niedostarczonych przez dostawcę spowoduje unieważnienie gwarancji na ten wózek inwalidzki i może spowodować obrażenia użytkownika lub uszkodzenie wózka.

5.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

5.1 ROZKŁADANIE WÓZKA

1. Stań obok wózka inwalidzkiego.
 2. Przytrzymaj obie rury podsiodłowe i rozsuń je.
 3. Popchnij obie rury podsiodłowe w dół, aby rozłożyć wózek. (Rys. 5.1.1)
 4. Zablokuj rury podsiodłowe na miejscu i sprawdź, czy tapicerka siedziska jest płaska.
 5. Załóż podnóżki i złóż podnóżki. (Rys. 5.1.1)
- Wózek inwalidzki jest gotowy do użytku.



5.2 SKŁADANY WÓZEK INWALIDZKI

1. Złóż podnóżki.
2. Stań obok wózka inwalidzkiego
3. Przytrzymaj krawędzie siedziska na środku tapicerki siedzenia i pociągnij go prosto do góry



5.3 REGULOWANE I DEMONTOWANE PODŁOKIETNIKI

1. Aby wyregulować wysokość podłokietnika, za pomocą klucza sześciokątnego zdejmij wspornik blokujący w górę i w dół ustaw na żadaną wysokość i dokręć śrubę. (Rys. 5.3.1 / Rys. 5.3.2)

2. Chwyć za podłokietnik ABS, aby go wyciągnąć. (Rys. 5.3.3)

3. Upewnij się, że blokada podłokietnika jest na swoim miejscu. (Rys. 5.3.4)

4. Przed użyciem sprawdź, czy podłokietnik jest bezpiecznie zablokowany.

OSTRZEŻENIE! Podczas prowadzenia wózka upewnij się, że podłokietnik jest zablokowany.



Fig 5.3.1

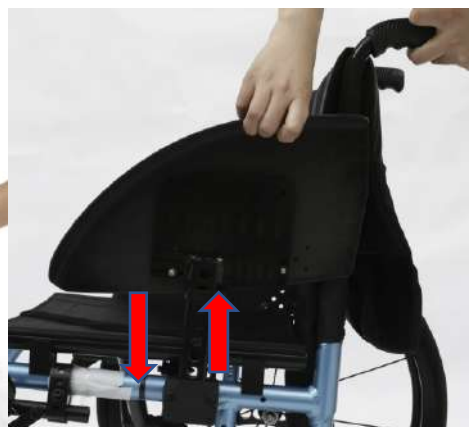


Fig 5.3.2



Fig 5.3.3



Fig 5.3.4

5.4 SKŁADANIE I OTWIERANIE PODNÓŻKA

1. Aby złożyć podnóżek, stań przed wózkiem. Podnieś podnóżek do góry (Rys. 5.4.1)
Następnie rozłóż podnóżek w przeciwnym kierunku, aby upewnić się, że podnóżek jest dobrze zamocowany.
2. Aby podnieść podnóżek pociągnij prosto do góry podczas składania wózka (Rys. 5.4.2)



Fig 5.4.1



Fig 5.4.2

5.5 WYREGULUJ ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

1. Zdejmij tylne koło, używając klucza sześciokątnego, aby usunąć miejsca adaptera tylnego koła. (Rys. 5.5.1)
2. Położenie przedniego widelca wraz z przednimi kołami można regulować do tyłu i do przodu za pomocą klucza imbusowego. (Rys. 5.5.2)
3. Jednocześnie należy wyregulować miejsce hamulca, aby dostosować położenie tylnego koła.



Fig 5.5.1



Fig 5.5.2

5.6 REGULACJA RURY OPARCIA

1. Zdejmij poduszkę oparcia.
2. Zdejmij tylne koło z ramy po obu stronach.
3. Za pomocą klucza sześciokątnego i narzędzia wyjmij regulowaną rurkę oparcia znajdującą się wewnątrz (Rys. 5.6.1)
4. Pociągnij w górę regulowaną rękojeść wewnątrz ramy, a następnie dokręć śruby w żądanym miejscu blokując wysokość. (Rys. 5.6.2)



Fig 5.6.1



Fig 5.6.2

5.7 REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA

1. Poluzuj nakrętkę kluczem i przesunąć wspornik podnóżka w dół i wyreguluj podnóżek na wymaganą wysokość. (Rys. 5.7.1)
2. Następnie użyj klucza, aby całkowicie dokręcić nakrętkę.
3. Upewnij się, że podnóżki są dobrze zablokowane i ustawione prosto.



5.8 HAMULEC RĘCZNY

Zaciągnij hamulec ręczny na obu kołach przed wejściem na wózek, opuszczeniem go i pochyleniem się do przodu na wózku lub podczas transportu windą lub windą dla wózków inwalidzkich. Upewnij się, że podnóżki nie odblokowują hamulców ręcznych, gdy są odchylane do tyłu. Po wyregulowaniu, szczęk hamulca ręcznego powinna być osadzona w oponie na co najmniej 1/8 cala po zaciągnięciu w pozycji zablokowanej. Hamulec ręczny aktywuje się, przesuwając manetkę całkowicie do przodu. Aby wyregulować hamulce, poluzuj nakrętkę na

śrubie hamulca. Przesuń zacisk w kierunku tylnego koła, aż do momentu gdy element cierny hamulca jest osadzony na co najmniej 1/8 cala w oponie, a uchwyt jest zablokowany. Dokręć nakrętkę i śrubę, aby zamocować na miejscu. Sprawdź, czy działanie blokujące jest prawidłowe przed rozpoczęciem użytkowania (Rys. 5.8.1)



Fig 5.8.1

5.9 DEMONTAŻ/MONTAŻ TYLNEGO KOŁA SZYBKO ZWALNIAJĄCEGO

1. DEMONTAŻ: Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania na piaście koła i zdejmij koło szybko zwalnając oś z otworu na oś. (Rys. 5.9.1 / Rys. 5.9.2)

2. MONTAŻ: Włóż oś szybkozamykacza wraz z kołem do otworu osi. (Rys. 5.9.2)

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że przycisk szybkiego zwalniania całkowicie blokuje się i pojawiają się dwie blokady w postaci kulek blokujących (Rys. 5.9.3)



Fig 5.9.1



Fig 5.9.2



Fig 5.9.3

5.10 UWAGA:

Stabilność — wózek inwalidzki został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny i stabilny, o ile utrzymujesz środek prawidłowy środek ciężkości. Nigdy nie sięgaj po przedmioty, które wymagają zmiany pozycji w wózku lub pochylenia się krzesło. Za każdym razem, gdy sięgasz po przedmioty, które wymagają pochylenia, upewnij się, że przednie kółka są skierowane do przodu, co wydłuża rozstaw kół i pomaga ustabilizować wózek.

Rampy - Znaj wcześniej własne możliwości i ograniczenia pod względem siły i wytrzymałości próbując wejść na rampę. Ty i Twój opiekun powinniście najpierw skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą ds. prawidłowej techniki poruszania się na wózku. Podczas wchodzenia lub schodzenia zalecana jest pomoc. Jeśli konieczne jest zatrzymanie się na pochyłości, unikaj nagłych, ruchów do przodu po wznowieniu napędzania wózka. Ze względu na kąt pochylenia wózka do tyłu, nagły gwałtowny ruch może spowodować niestabilność. Próba użycia hamulców może spowodować przypadkowe zablokowanie, skręcenie lub przechylenie na bok lub nagłe zatrzymanie.

Unikaj zmiany kierunku podczas zjeżdżania ze wzniesienia, ponieważ może to spowodować niestabilność.

6.0 KONSERWACJA I KONTROLE MIESIĘCZNE

Zdecydowanie zaleca się coroczne serwisowanie wózka inwalidzkiego u wykwalifikowanego usługodawcy. Wskazany jest dokładny przegląd i serwis konserwacyjno-naprawczy.

Pielęgnacja ogólna — Oczyszczyć wszystkie metalowe części woskiem samochodowym lub podobnymi produktami. Natychmiast wysuszyć wózek, jeśli został narażony na działanie wilgoci. Nie używaj ściernych środków czyszczących, które porysują wykończenie wózka.

Miesięczne kontrole:

Sprawdź cały wózek pod kątem pękniętych części i luźnych elementów mocujących. W razie potrzeby elementy należy wymienić lub dokręcić.

Przednie i tylne opony — pełne opony wymagają minimalnej konserwacji, ale od czasu do czasu powinny być czyszczone wilgotną ściereczką. Wymień opony, jeśli są popękane lub mocno zużyte.

Przednie kółko samonastawne i tylne koła — Sprawdź, czy koła nie są wypaczone, a szprychy nie połamane. Upewnij się również, że łożyska są w dobrym stanie, a koła obracają się swobodnie.

Przednie widelce — sprawdź, czy widelce obracają się swobodnie bez zakleszczania. Jeśli występuje blokowanie, sprawdź łożyska i wyczyść obudowę wspornika widelca. Jeśli nakrętka jest zbyt luźna, kółko będzie trzepotać lub chybotać. Jeśli jest za ciasno, wózek będzie trudny do kierowania.

Koła - Duże tylne koła należy sprawdzić pod kątem prawidłowego dokręcenia. Jeśli koło się chwieje lub jest luźne, łożyska mogą być zużyte. Śruba szybkozamykająca może nie być zablokowana na swoim miejscu lub należy ją wyregulować. Aby sprawdzić, czy oś szybkozamykacza jest zablokowana, upewnij się, że jest wepchnięta do końca, przycisk wysunie się, a dwa małe łożyska kulkowe wystają przez otwory w obudowie na przeciwnym końcu osi. Nie próbuj regulować mechanizmu szybkiego zwalniania. Powinien to wykonać wykwalifikowany personel.

Zanieś wózek do lokalnego dostawcy w celu naprawy.

Mechanizm szybkiego zwalniania — Mechanizm szybkiego zwalniania należy sprawdzić pod kątem prawidłowego działania.

Szybkozamykacz należy wyczyścić i nasmarować (lub wymienić w razie potrzeby), jeśli przycisk nie uruchamia się łatwo lub gromadzi się brud.

Rama — Sprawdź, czy rama nie jest wygięta ani wgnieciona. Sprawdź rury pod kątem pęknięć i rdzy. Jeżeli zostaną wykryte problemy, zanieś wózek do lokalnego usługodawcy.

Oczyszczyć i lekko nasmaruj trzy tylne osie po obu stronach ramy, aby zapobiec korozji. Plastikowe czapki

powinny być umieszczone nad osiami, gdy nie są używane.

7.0 GWARANCJA

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwotnego nabywcę. Twój oryginalny rachunek będzie niezbędny jako dowód zakupu przed wykonaniem jakichkolwiek świadczeń gwarancyjnych.

Wózek został zbudowany zgodnie z rygorystycznymi standardami i dokładnie sprawdzony przed wysyłką. Producent gwarantuje, że będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwóch lat od daty zakupu.

Jeśli w okresie gwarancyjnym produkt okaże się wadliwy, zostanie naprawiony lub wymieniony, według uznania dostawcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem właściciela lub normalnego zużycia eksploatacyjnego.

Gwarancja nie obejmuje elementów nietrwałych, w tym między innymi akcesoria gumowe, kółka, uchwyty i tapicerki, nakładki podłokietników, które ulegają normalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń spowodowanych przez użycie nieautoryzowanych części, dodatków lub napraw, zaniedbania, wypadku lub jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą dostawcy, takich jak niewłaściwe działanie obsługi, konserwacji lub przechowywania.

Jeśli masz pytanie dotyczące produktu lub tej gwarancji, skontaktuj się z dostawcą

Producent:

Zhenjiang Assure Medical Equipment Co.,Ltd

Add: No.297, Chuqiao road, Zhenjiang city, Jiangsu province,China

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Lotus NL B.V.

Address: Koningin Julianaplein 10,1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Dystrybutor na terenie Polski:

MB Medica s.c.

ul. Nowowiejskiego 20

42-217 Częstochowa, Polska